

WTYKI ODCIĄGÓW GAZÓW ANESTETYCZNYCH



wtyk AGSS AGA



wtyk AGSS DIN 1



wtyk AGSS DIN 2
prosty



wtyk AGSS DIN 2
kątowny

NAZWA

Wtyk odciągu gazów poanestetycznych AGSS DIN I

Wtyk odciągu gazów poanestetycznych AGSS DIN II

Wtyk odciągu gazów poanestetycznych AGSS DIN II kątowny

Wtyk odciągu gazów poanestetycznych AGSS AGA

INDEKS

OGD 01 01 00

OGD 02 01 00


OGD 02 01 01

OGA 01 01 00

Obsługa:

Wtyk wsunąć w punkt poboru aż do słyszalnego zatrzaśnięcia. Włożenie wtyku powoduje otwarcie zaworu zwrotnego i zaworu ze sprężonym gazem. Sprężony gaz przepływa przez inżektor i wytwarza podciśnienie. Sygnał wizualny wskazuje gotowość systemu do pracy. Możliwe jest teraz odsysanie gazów anestetycznych. Po naciśnięciu pierścienia naciskowego punktu poboru można wyciągnąć wtyk z punktu poboru. Należy przy tym przytrzymać wtyk ręką! Zawór zwrotny i zawór gazu sprężonego zamykają się automatycznie, odsysanie jest przerwane.

WTYKI ODCIĄGÓW GAZÓW ANESTETYCZNYCH

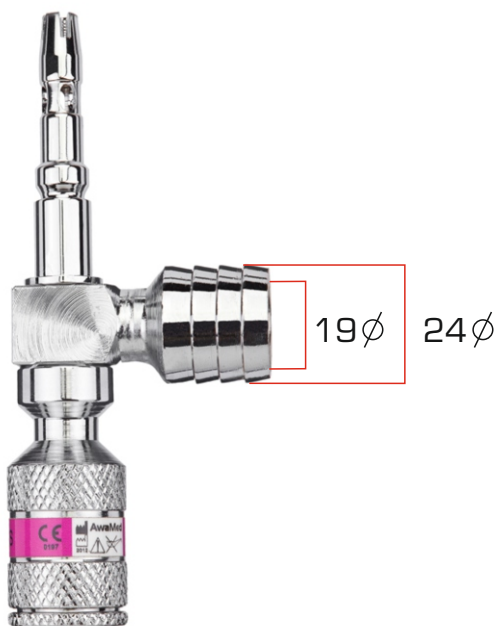

wtyk AGSS AGA

wtyk AGSS DIN 2
prosty



wtyk AGSS DIN 1



wtyk AGSS DIN 2
kątowy

