


BUDOWA NAWILŻACZA

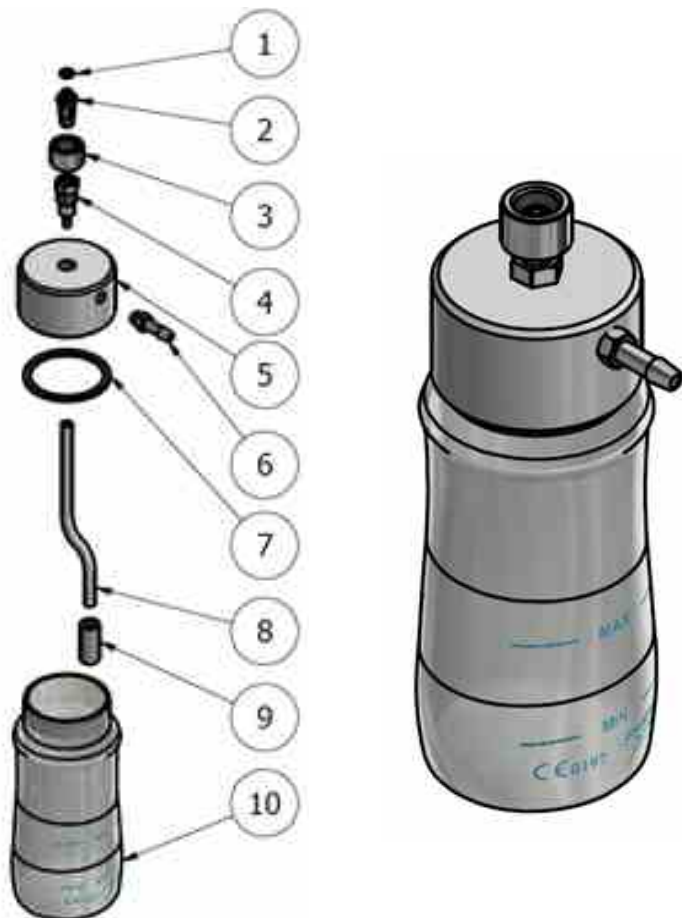

CZĘŚCI NAWILŻACZY

INDEKS

| | | |
|----|--|--------------|
| 1 | O-ring 5x2 white silikon | ORG 05 20 01 |
| 2 | Nypel półkulowy | NBZ 02 04 00 |
| 3 | Nakrętka nypla radełkowa | NBZ 02 05 00 |
| 4 | Łącznik z tuleją na wąż fi wew. 3 mm | NBZ 02 06 02 |
| 5 | Korpus butli nowej | NBZ 02 07 03 |
| 6 | Tuleja z gwintem | NBZ 02 08 00 |
| 7 | Uszczelka 46x54x2 mm pod butelkę 300 ml OP-EPDM | USZ 01 03 00 |
| 8 | Wąż silikonowy fi zew. 7 mm, fi wew. 3 mm do filtra nawilżacza | WAZ 00 00 05 |
| 9 | Filtr nawilżacza (napowietrzacz) typ Hp20 ver. II | NBZ 02 02 07 |
| 10 | Butelka nawilżacza 0,30 l, polipropylenowa (nadruk niebieski) | NBZ 02 02 04 |